


사용설명서



오므론 컴프레서 네블라이저

NE-C803-W COMPACT A1R NE-C803-B

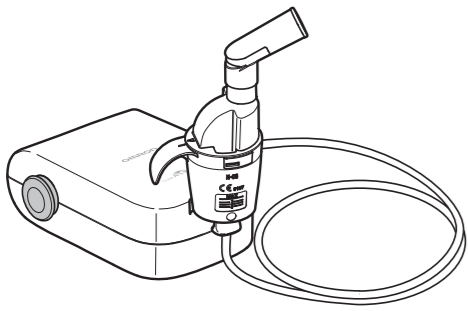

오므론 제품을 구입하여 주셔서 감사합니다.

- 안전하고 올바르게 사용하기 위하여 사용 전에 본 사용설명서를 반드시 읽어 주십시오.
- 본 설명서는 항상 가까이 두고 참조하여 주십시오.
- 본 설명서는 품질보증서를 겹하고 있습니다. 분실하지 않도록 잘 보관하여 주십시오.

본 설명서에 기재되어 있는 일러스트는 이미지입니다.

All for Healthcare 9201050-8C

보증규정

1. 사용설명서, 본체 부착 라벨 등의 주의사항에 따라 정상적으로 사용한 상태에서, 구입 후 1년 이내에 고장이 발생한 경우 무상 수리 또는 교환 해드립니다.
2. 무상 수리 기간 내에 고장이 발생하여 수리를 받아야 하는 경우에는, 오므론 고객센터 센터로 연락하여 주십시오.
3. 무상 수리 기간 내인 경우라도 다음과 같은 경우에는 유상 수리가 됩니다.
 - (1) 사용자의 실수 및 부당한 수리나 개조에 따른 고장이나 손상
 - (2) 구입 후 제품을 떨어뜨리는 등에 따른 고장이나 손상
 - (3) 화재, 지진, 수해, 낙뢰, 기타 천재지변이나 공해, 전원의 이상전압, 지정된 것 이외의 사용전원(전압, 주파수) 등에 의한 고장이나 손상
 - (4) 품질보증서의 표시가 없는 경우
 - (5) 품질보증서에 구입 년월일, 고객명, 판매처명이 기록되지 않은 경우 또는 기록 내용을 수정한 경우
 - (6) 소모부품 (별매품)
 - (7) 고장 원인이 본 제품 이외에 있을 경우
 - (8) 기타 사용설명서에 기재되어 있지 않은 사용방법에 따른 고장이나 손상
4. 품질보증서는 재발행되지 않으므로 분실하지 않도록 잘 보관해 주십시오.
5. 품질보증서는 본 규정에 명시된 기간, 조건에 따라 무상보증을 약속하는 것입니다. 따라서, 이 보증서가 고객님의 법률상 권리를 제한하지는 않습니다.

품질보증서

오므론 제품을 구입해 주셔서 감사합니다. 본 제품은 엄격한 검사를 통해 뛰어난 품질을 확보하고 있습니다. 그러나 정상적인 사용에서 고장이 발생하였을 경우는 보증규정에 따라 구입 후 1년 동안 무상수리 또는 교환에 드립니다.

※ 제품 보증은 한국 내에서 판매된 제품에 한합니다. ※ 아래의 사항은 반드시 판매처에서 가입하여 This warranty is valid only in Korea. 날인하여 주십시오.

판매행 오므론 컴프레서 네블라이저 NE-C803-W / NE-C803-B	판매처
고객명 	
주 소 	주 소
TEL ()	TEL ()
구입년월일 년 월 일	

한국오므론헬스케어(주)
서울특별시 서초구 강남대로 465, A동 18층 (서초동, 교보타워)

※ 사용설명서 작성년월: 2015년 06월
※ 사용설명서 개정년월: 2017년 07월

사용 목적

목적 본 제품은 호흡기 질환의 흡입 요법으로 사용됩니다.

사용 대상자

- 의사, 간호사, 요법사 등의 전문 지식을 가진 의료 종사자
- 의료 종사자의 전문 지식을 받은 간호인(보호자) 및 환자 본인
- NE-C803의 전반적인 조작과 사용설명서의 문장을 이해할 수 있는 사람

대상 환자

의식이 없는 환자 또는 자가 호흡이 안되는 환자에게 사용하지 마십시오.

환경

일반 가정의 실내에서 사용하도록 고안되었습니다. 병원, 의원, 의료 시설 등의 병동 실내에서 사용할 목적으로는 고안되지 않았지만, 사용은 가능합니다.

유효 기간

상온, 상습에서 1일 2회로 각 8분간, 2mL의 약액을 분무하는 조건의 경우 아래의 표와 같습니다. 사용환경 및 사용 빈도에 따라 유효 기간은 짧아질 수 있습니다. (유효 기간은 표준적인 내구성을 나타내며, 보증 기간과는 다릅니다.)


본체, 전용 AC 어댑터	5년
네블라이저 키트, 마우스피스, 노즈피스 (별매품), 에어튜브, 흡입 마스크 (소), 흡입 마스크 (대), 어린이용 액세서리 (별매품)	1년
에어필터	60일

주의사항

사용설명서에 기재된 경고와 주의사항을 지켜 주십시오.


분무 구조

흡수관을 통해서 상부로 끌어올려진 약액이 압축기에 의해 발생한 압축 공기와 혼합되어 압착됩니다. 약액이 압축 공기와 더해져서 미세한 안개가 되어 외부로 분출됩니다.

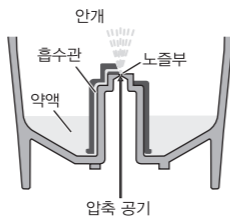

다음 품목들이 들어 있습니까 ?

• 본체

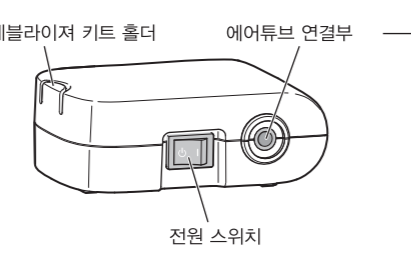

• 네블라이저 키트

• 위기 도입관

• 흡수관

• 약액병

• 노즐부

• 에어튜브 연결부

• 마우스피스

• 흡입 마스크 (대) (PVC)

• 흡입 마스크 (소) (PVC)

• 전용 AC 어댑터 (HHP-KSM01)

• 수납 소프트 케이스 (PVC, 100cm)

• 전용 AC 어댑터 (HHP-KSM01)

• 수납 소프트 케이스 (PVC, 100cm)

• 교환용 에어필터 (5개)

• 어린이용 액세서리 (코끼리)

• 어린이용 액세서리 (토끼)

• 어린이용 액세서리 (곰)

• 수납 소프트 케이스

• 사용설명서 : 본 책자 (품질보증서 포함)

안전을 위한 주의사항

사용하기 전에 반드시 읽어 주십시오. 여기에 표시된 내용은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여, 사용자는 물론 다른 분들에게 미칠 수 있는 위험이나 재산 상의 손해를 미연에 방지하기 위한 것입니다. 표시와 의미는 다음과 같습니다.

경고, 주의에 대하여

경고

잘못 취급하면, 사람이 사망 또는 중상을 입을 가능성이 있다는 것을 나타냅니다.

주의

잘못 취급하면, 사람이 상해를 입거나 물적 손해 * 의 발생이 있다는 것을 나타냅니다.

* 물적 손해란, 기류·가재 및 가혹·예외 동물 등에 관련된의 손해를 나타냅니다.

그림 기호의 예

! (경고)

● 기호는 강제 (꼭 지킬 것) 를 나타냅니다. (일반적인 " 금지 ")

⊘ (금지)

⊘ 기호는 금지 (해서는 안 되는 것) 를 나타냅니다. (일반적인 " 금지 ")

경고

■ 약액의 종류, 용량, 용법에 대해서는 반드시 의사나 약사의 지시에 따라 주십시오.

■ 사용 중에 이상을 느꼈을 경우에는 사용을 멈추고 담당 의사에게 상담하여 주십시오.

■ 세척, 소독 후에는 깨끗한 온수로 세척용, 소독액을 충분히 제거하여 주십시오.

• 증상이 악화될 수 있습니다.

■ 구입 후 처음 사용할 때, 네블라이저 키트, 흡입 마스크 및 마우스피스를 세척, 소독하여 주십시오.

■ 장기간 사용하지 않은 경우 또는 여러 사람이 사용하는 경우에는 사용 전에 네블라이저 키트, 흡입 마스크 및 마우스피스를 세척, 소독하여 주십시오.

■ 사용 후에는 반드시 부품을 세척하여 완전히 건조시킨 후에 청결한 장소에 보관하여 주십시오.

■ 사용 후에는 반드시 남은 약액을 버리고 흡입할 때마다 새로운 약액을 사용하여 주십시오.

• 병균이 번식하여 증상이 악화될 수 있습니다.

■ 사용할 때 이외에는 유아 및 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.

• 작은 부품을 삼킬 수 있습니다. 삼킨 경우에는 곧바로 의사의 치료를 받아 주십시오.

■ 물을 흡입용으로 사용하지 마십시오. 목, 코 등의 가슴을 목적으로 한 제품이 아닙니다.

• 증상이 악화될 수 있습니다.

■ 에어튜브 내부에 물이 남은 상태로 보관하지 마십시오.

• 병균이 번식하여 증상이 악화될 수 있습니다.

■ 가연성 가스가 내재되어 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.

• 화재의 원인이 됩니다.

■ 사용 중에 모포나 타올 등으로 본체를 덮지 마십시오.

• 발열이나 감전, 고장의 원인이 됩니다.

■ 마취 회로 또는 인공호흡기 회로에서 사용하지 마십시오.

• 사고의 원인이 됩니다.

■ 젖은 손으로 전원 플러그를 빼거나 꽂지 마십시오.

• 습도가 높은 장소에서 사용 또는 보관하지 마십시오.

■ 파손된 전용 AC 어댑터를 사용하여 마십시오.

• 온도가 높은 장소에서는 전용 AC 어댑터를 사용하지 마십시오.

• 감전이나 화재, 부상의 원인이 됩니다.

■ 본체나 전용 AC 어댑터는 물로 씻거나 물에 담그거나 약액을 흘리지 않도록 주의하여 주십시오. 약액이 흐른 경우 신속하게 닦아 주십시오.

• 누전이나 감전, 고장의 원인이 됩니다.

■ 오므론에서 지정한 본 제품의 전용 AC 어댑터를 사용하십시오.

• 발열, 발화의 원인이 됩니다.

주의

■ 어린이 또는 의사를 표시할 수 없는 사람에게 사용하는 경우에는 반드시 옆에서 보호자와 같이 사용하여 주십시오.

• 사고나 증상 악화의 원인이 됩니다.

■ 부품이 올바르게 장착되었는지 확인하여 주십시오.

■ 에어필터가 올바르게 장착되었는지 확인하여 주십시오.

■ 에어필터의 상태를 확인하여 주십시오. 에어필터의 색이 변했거나 60일 이상 사용한 경우에는 새로운 에어필터로 교환하여 주십시오.

■ 본 제품의 부속품, 별매품은 정품만 사용하여 주십시오.

• 정상적으로 분무되지 않아 증상이 악화될 수 있습니다.

■ 풍여서 소독할 경우, 항상 물의 양을 확인해 주십시오.

• 화재의 원인이 됩니다.

■ 얼굴에 약액이 남지 않도록 흡입 마스크를 제거한 후에 반드시 얼굴을 닦아 주십시오.

• 피부염의 원인이 됩니다.

■ 사용 후와 세척 전에는 전용 AC 어댑터를 콘센트로부터 뽑아 주십시오.

• 감전이나 부상의 원인이 됩니다.

■ 적절한 전압 (AC 220V)에서 사용하여 주십시오. 여러 개의 전원을 연결하여 사용하지 마십시오.

• 감전이나 화재의 원인이 됩니다.

■ 네블라이저 키트를 45° 이상 기울이거나 강하게 털지 마십시오.

■ 에어튜브가 접힌 채로 사용하지거나 보관하지 마십시오.

■ 약액병에 약액이 10mL를 넘지 않도록 하여 주십시오.

■ 파손된 네블라이저 키트, 흡입 마스크 및 마우스피스는 사용하지 마십시오.

■ 핀이나 예리한 것으로 약액병이나 흡수관의 노즐부를 찌르지 않도록 주의하여 주십시오.

• 정상적으로 분무되지 않아, 증상이 악화될 수 있습니다.

■ 소독의 목적으로 EOG 가스 멸균, 저온 플라즈마 멸균 등을 사용하지 마십시오.

• 잔류 가스 등의 영향으로 인해 증상이 악화될 수 있습니다.

■ 본체를 건조할 목적으로 전자레인지, 식기건조기, 헤어드라이어 사용하지 마십시오.

• 화재나 고장의 원인이 됩니다.

■ 고온 및 저온, 또는 직사 광선 아래에 방치하지 마십시오.

■ 부품을 건조할 목적으로 전자레인지, 식기건조기, 헤어드라이어 사용하지 마십시오.

• 고온에 의해 변형되어 정상적으로 분무되지 않아 증상이 악화될 수 있습니다.

■ 사람 이외에 사용하지 마십시오.

• 사고의 원인이 됩니다.

■ 사용 중 본체가 뜨거운 느낌이 있습니다. 전원을 끄는 등 필요한 조작 이외에는 본체를 만지지 마십시오.

• 저온 화상의 위험이 있습니다.

■ 본체를 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지 마십시오.

• 본체의 빈 틈을 통해 손가락이나 물건을 넣지 마십시오.

• 감전이나 고장, 부상의 원인이 됩니다.

■ 흡기구에 에어필터 커버 외의 물체를 끼워 넣거나 흡기구에 에어튜브를 끼우지 않도록 주의하여 주십시오.

■ 흡기구를 막은 상태로 전원을 켜거나 동작 중에 흡기구를 막지 마십시오.

• 본체 파손의 원인이 됩니다.

■ 전용 AC 어댑터의 전원 코드를 다른 목적으로 사용하지 마십시오.

• 본체나 전용 AC 어댑터를 분해나 수리하지 마십시오.

• 화재나 고장, 사고의 원인이 됩니다.



경고



금지

